

Flexitime



Flexitime Bite®

- Pour l'enregistrement universel de l'occlusion et le scannage de l'antagoniste, sans utilisation de poudre
- Dureté finale extra-haute: 40 Shore D
- Temps de prise en bouche extrêmement rapide de 30 sec.
- Thixotropie marquée et consistance crémeuse
- Facile à découper ou à meuler avec un risque infime de fracture



Flexitime®

Précision garantie – tout le temps

Flexitime®

Bite

Flexitime Bite est un matériau d'empreinte à réaction d'addition destiné à l'enregistrement de l'occlusion. Il est utilisable pour l'enregistrement classique de l'occlusion et également scannable pour la numérisation des empreintes antagonistes, par exemple pour réaliser des restaurations tout céramique en ayant recours à la technologie CAD-CAM (CFAO).

Fidélité de l'empreinte, précision

- Extra dur : il possède une très haute dureté finale de 40 Shore D qui prévient les déplacements indésirables lors de l'installation des modèles en plâtre dans l'articulateur.
- Thixotropie marquée : ce qui empêche l'écoulement du matériau hors de la surface occlusale et dans les espaces inter-dentaires et garantit une désinsertion aisée.
- Aptitude au scannage remarquable pour la numérisation des empreintes antagonistes, sans usage de poudre, en CFAO.


Manipulation simple, pratique et sûre

- Extrêmement rapide : il présente un temps de travail confortable de 30 secondes et temps de prise rapide en bouche de 30 secondes, pour un plus grand confort du praticien et du patient.
- Facile à découper à l'aide d'un scalpel ou à meuler, avec un minimum de risque de fracture.
- Une consistance crémeuse qui garantit l'absence de résistance lors de la l'occlusion.

Indications

Flexitime Bite possède de multiples indications:

- Enregistrement standard d'occlusion en position d'intercuspidie maximale
- Garniture de la fourche d'occlusion (arc facial de transfert)
- En tant que clé pour la fixation de plaques d'enregistrement intra-buccal
- Réalisation de petits segments de modèles
- Enregistrement optique des données des antagonistes, sans usage de poudre, en CFAO

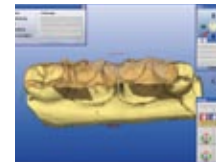

Données techniques

Couleur	Temps de travail	Temps de prise en bouche (min.)	Dureté HD	Dureté Shore D	Dureté Shore A
lavande	0:30 min	0:30 min	78	40	≥ 94

Source: Recherche & Développement, Heraeus Kulzer GmbH, Dormagen (Allemagne), données fichées

Flexitime Bite en cartouche

3 x (2x50ml) Flexitime Bite

3 x 6 embouts mélangeurs verts

Réf. 6603 8751

Flexitime Bite est également disponible en emballage de 2x50ml chez votre distributeur habituel.



Contact au Benelux

Heraeus Kulzer Benelux B.V.

Postbus 986
2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-venus.com

Contact en France

Heraeus

Division Dentaire
Villebon - BP 630
91945 Courtabœuf Cedex
Tél: +33 (0)1 69 18 48 85
Fax: +33 (0)1 69 28 78 22
dentaire@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

N° Azur 0 810 813 250

Coût appel local

Contact en Suisse

Heraeus Kulzer Schweiz AG

Ringstrasse 15A
CH-8600 Dübendorf
T +41 (0)43 333 72 55
F +41 (0)43 333 72 51
officehkch@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.ch